

An- und Ausziehanleitung für Einmalhandschuhe



Ziehen Sie den Handschuh vorsichtig locker über die Finger und stecken Sie den Daumen der anderen Hand locker auf der Unterseite des Handgelenkes in den Handschuh.




Greifen Sie nun mit den anderen Fingern auf der Außenseite des Handschuhs auf den innenliegenden Daumen. Ziehen Sie den Handschuh ohne übermäßiges Dehnen über die Stulpe nach oben in die Richtung der Ellbogenbeuge.




Ziehen Sie den Handschuh in die richtige Passform ohne diesen zu überdehnen. Durch Überdehnung kann das Material soweit geschwächt werden, dass es beim Anziehen oder eventuell nach der Nutzung beim Ausziehen reißt.



Vermeiden Sie ein zu starkes Stretchen und die Überdehnung des Handschuhs. **TIPP:** Handschuhe nicht viel weiter als über das Handgelenk ziehen.

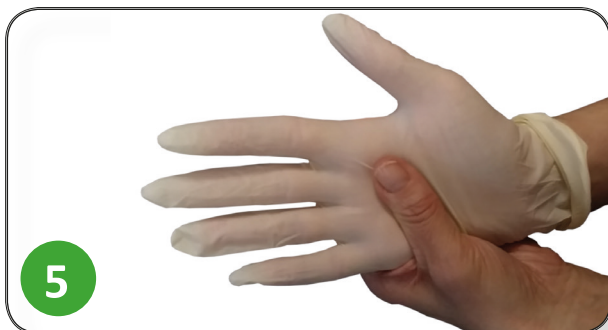

Zum Abschluß bringen Sie die einzelnen Finger des Handschuhs in die richtige Position.

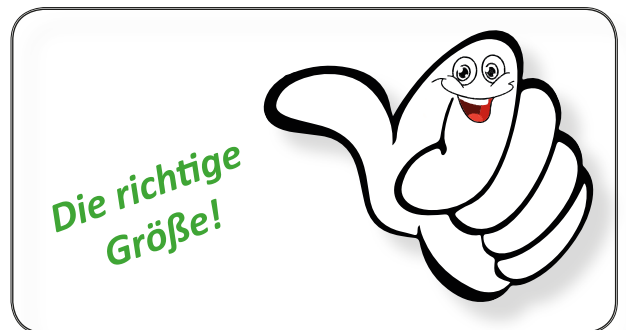

Wählen Sie die für Sie geeignete Handschuhgröße (die Maße können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ausfallen), um eine Überanspruchung des genutzten Handschuhs durch Überdehnung (häufiges Reißen der Handschuhe) zu vermeiden.



Beim Ausziehen greift zunächst eine Hand in die Innenfläche der anderen Hand und hebt den Handschuh an. Die Hand zieht den Handschuh ganz ab und hält ihn fest.



Die nicht behandschuhte Hand fasst nun unter die Stulpe der behandschuhten Hand und zieht den Handschuh ebenfalls ab. Am Ende ist der Handschuh umgekrempt und hält den anderen Handschuh in sich.

Die Handschuhe werden im entsprechenden Behälter entsorgt. Anschließend erfolgt eine hygienische Händedesinfektion.